



castelberg
DESIGN

smartglass M3 IPL

Aktive Schutzbrille Active Safety Glasses

ARBEITEN IN FARBE
2.5 8



Bedienungsanleitung

Warnhinweis! Die aktive Schutzbrille smartglass M3 IPL ist ausschliesslich zum Schutz vor intensiv gepulstem Licht entwickelt, wie es bei IPL (intense pulsed light) Behandlungen auftritt.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch.

Diese persönliche Schutzausrüstung (PSA) untersteht der EU-Regulierung 2016/425, mit Gültigkeit ab April 21, 2018.

Eigenschaften

- Reaktionszeit von weniger als einer Millisekunde
- Vollständige Farberkennung und natürliche Sicht mit realcolor Optik
- Maximaler Augenschutz bei minimalem Gewicht
- Kombiniert Komfort mit Sicherheit
- CE zertifiziert nach EN166, EN170, EN172, EN379, ISO 12609-1

Anwendung und Bedienung

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** wurde speziell entwickelt für Menschen welche mit IPL-Pulsen arbeiten. Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** schützt zuverlässig gegen die schädliche Blendung von IPL-Pulsen bei hohem Tragekomfort.

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** können Sie aufsetzen und sofort mit dem Arbeiten beginnen. Kein Ein- und Ausschalten ist nötig. Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** dunkelt automatisch ab.

Technik

Bei Auftreten eines Lichtpulses schaltet die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** aus dem Hellzustand von Schutzstufe < 3 automatisch in einen Dunkelzustand von Schutzstufe 8 innert weniger als einer Millisekunde. Die Elektronik dunkelt ab, sobald eine unangenehme Helligkeit erreicht wird.

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** schützt vor Strahlung im Bereich von 200 – 3000 nm Wellenlänge. Die realcolor Optik ist im Hellzustand klar und erlaubt eine vollständige Farberkennung. Hautgegebenheiten und Signalfarben können so genau wahrgenommen werden.

Technische Daten

- Material Brillenrahmen: Polycarbonat (PC), hautverträglich
- Material Funktionseinsatz: Glas/Kunststoff, hautverträglich
- Gesamtgewicht: 42 g
- Abmessungen: 170 x 150 x 50 mm
- Normen CE: EN166, EN170, EN172, EN379, ISO 12609-1
- Garantie: 5 Jahre
- Lebensdauer: Min. 6 Jahre einschliesslich Batterie

Kennzeichnung CE

3 / > 8 / GEO / 1 / 1 / 1 / 2 / 379 CE

Hellzustand	Dunkelzustand	Hersteller	Optische Klasse	Streulichtklasse	Homogenitätsklasse	Winkelabhängigkeit	CE Standard
-------------	---------------	------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------

Eine original aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** muss diese Kennzeichnung aufweisen!

Hersteller: castelberg design gmbh
Etzelstrasse 44E
8020 Wädenswil
Schweiz

Notifizierte Stelle: ECS GmbH (1883)
Hüttfeldstrasse 50
73430 Aalen
Deutschland

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website:
castelberg-design.com

Wartung, Lebensdauer und Garantie


Abgesehen von Reinigung ist keine Wartung nötig. Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** kann mit einem Microfaser-Tuch oder einem handelsüblichen Brillenreinigungs-Tuch gereinigt werden. Für die Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel und reinigen Sie die Brille mit einem Tuch. Sie sollten niemals Flüssigkeiten direkt auf das Produkt leeren oder sprühen.

Die Stromversorgung wird durch eine fest eingebaute Lithium-Batterie gewährleistet. Die Lebensdauer beträgt mindestens 6 Jahre und sie kann vom Hersteller ersetzt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer fachgerecht.


Die Werksgarantie auf Material- und Fabrikationsfehler beträgt 5 Jahre. Davon ausgeschlossen sind Schäden aufgrund unsachgemässer Handhabung. Die Garantie gilt nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungsbereich und nur für unveränderte Produkte. Über den Garantie-Austausch eines Produktes hinaus sind keine weiteren Schäden gedeckt.

Auswechseln von Schutzscheibe oder Funktionseinsatz

Schutzscheibe:
Klappen Sie die Schutzscheibe nach oben. Ziehen Sie die Schutzscheibe aus der Nut. Setzen Sie die neue Schutzscheibe ein und lassen Sie sie einrasten.

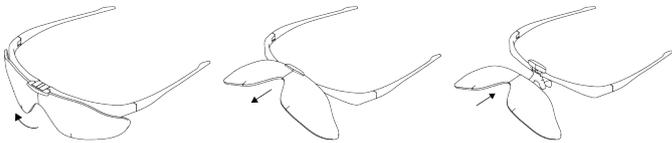

Funktionseinsatz:
Fügen Sie eine Münze zwischen Brillenrahmen und Funktionseinsatz. Durch eine leichte Drehung kann der Funktionseinsatz entfernt werden. Positionieren Sie den Funktionseinsatz mit dem Nocken in die Aussparung am Brillenrahmen. Lassen Sie den Funktionseinsatz mit sanftem Druck einrasten.

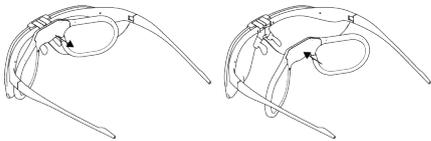

Sicherheitshinweise

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** darf nicht für andere Anwendungen als zum Schutz vor intensiven Lichtpulsen verwendet werden.

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** sollte bei Temperaturen von -10°C bis +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80% gelagert werden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Sonnenlicht. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und +55°C. Längerer Gebrauch ausserhalb der idealen Temperaturen kann zu Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Die Lagerung zusammen mit Säuren, Laugen, Ölen und organischen Lösungsmitteln kann das Produkt beschädigen.

In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Falls Hautirritationen auftreten, darf die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** nicht weiterverwendet werden und ärztlicher Rat wird empfohlen.

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** ist als Kombination von Brillenrahmen, Schutzscheibe und aktivem Funktionseinsatz zertifiziert. Der Funktionseinsatz darf nicht ohne Schutzscheibe verwendet werden.

Bei Unregelmässigkeiten beim Gebrauch oder bei sichtbaren Beschädigungen dürfen Sie die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** nicht weiter benutzen.

Die aktive Schutzbrille **smartglass M3 IPL** darf nicht über eine weitere Brille getragen werden. Beim Auftreffen von Hochgeschwindigkeitsteilchen werden Stösse übertragen, welche eine Gefahr für den Träger sein können.

Jede Verwendung der aktiven Schutzbrille **smartglass M3 IPL** ausserhalb des vorgeschriebenen Anwendungsbereiches, im Speziellen bei extremen Temperaturen oder unter Beschuss von Hochgeschwindigkeitspartikeln, ist ausdrücklich nicht zulässig.

Zubehör / Ersatzteile

Die Ersatzteile Brillenrahmen, Schutzscheibe und Funktionseinsatz sind einfach auswechselbar. Sie können einzeln bestellt werden.

Brillenrahmen weiss mit Schutzscheibe clear blue
Artikel Nr.: 20.050

Schutzscheibe clear blue
Artikel Nr.: 10.810

Funktionseinsatz M3 IPL
Artikel Nr.: 20.055

Vertrieb

Der Vertrieb erfolgt über den qualifizierten Fachhandel, unseren Onlineshop oder über die direkte Kontaktaufnahme zu uns. Wir nennen Ihnen gerne auch den für Sie nächsten Vertriebspartner.

Bitte besuchen Sie unsere Website castelberg-design.com für weitergehende Informationen.

Haben Sie eine Frage zum Produkt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir helfen gerne weiter.

